

----- 医療機器の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。 -----

精密限外濾過フィルター「CF-609N」に関するご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

今般、多用途透析装置（製造販売元 澁谷工業株式会社）付属品として販売しております精密限外濾過フィルター「CF-609N」（以下「本製品」といいます。）について、熱水消毒を行っている一部の医療機関において、本製品にリークが発生するとのご報告を受領いたしました。本製品は製造時に全数リーク検査を行い、合格したのみ出荷しております。同様の事象が発生する可能性は低いと考えますが、念のために本事象につきまして情報提供させていただくことといたしました。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

◆ 重要な事項

・本製品の洗浄消毒条件については下表、または多用途透析装置の添付文書に記載されている洗浄条件を遵守の上、消毒をお願い申し上げます。また、多用途透析装置に搭載されているリークチェックでリークと判定された場合には速やかに交換頂きますようお願い申し上げます。

表：本製品取扱説明書記載 洗浄条件

	項目	消毒液	時間(最大)	頻度
1	薬液消毒	次亜塩素酸ナトリウム シングルパス 1,000ppm 貯留 300ppm	60分 24時間	1回/日 1回/日
2	薬液消毒	過酢酸 シングルパス 200ppm 貯留 100ppm	60分 24時間	1回/日 1回/日
3	酸消毒	酢酸 2%	60分	1回/週
4	熱水洗浄	70～86℃の熱水	60分	1回/日
5	熱水洗浄	70～86℃のヘモクリーン C 2%	60分	1回/日

以上

お問い合わせ先：ニプロ株式会社 透析・血液浄化商品開発・技術営業部

大阪市北区本庄西3丁目9番3号

電話 06-6373-0092 FAX 06-6373-1581