


ニプロランセット専用穿刺器具 ニプロライトショットL 取扱説明書

商品名／ニプロライトショットL
構成／穿刺器具本体、穿刺キャップ×各1個

【注意】

- ・本品は、血糖自己測定などの微量採血を目的とする個人用の穿刺器具です。血液由来の感染防止のため、複数の人で使い回さないでください。
- ・ニプロランセット用穿刺器具です。他社製品のランセットには使用できません。
- ・ニプロランセットは1回限りの使用です。再使用はできません。
- ・使用時にニプロランセットの保護キャップが既に外れているものや、清潔でないランセットは使用しないでください。
- ・直射日光に注意し、小児の手の届かないところに保管してください。


各部の名称

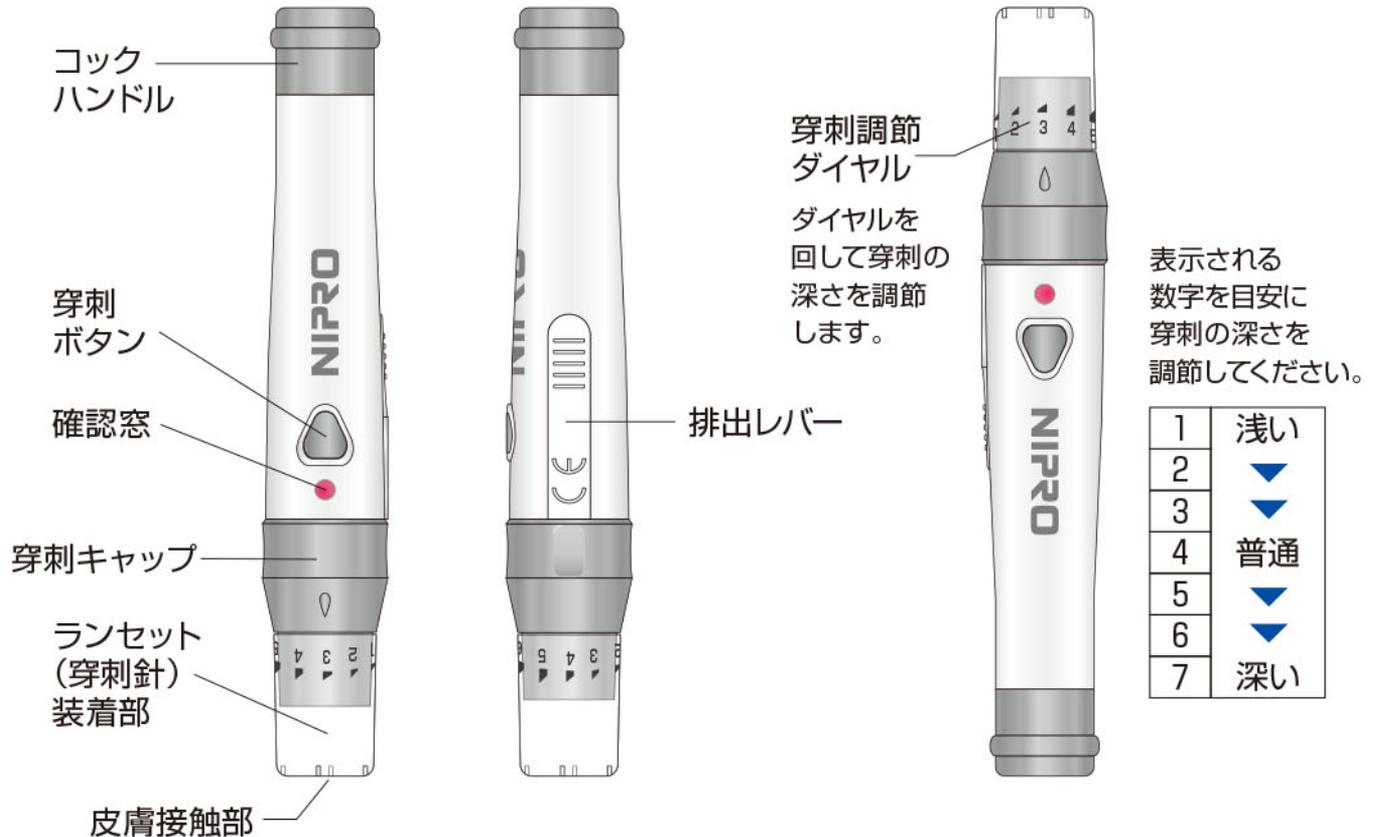

初めてお使いになるときは調節ダイヤルを回して穿刺深さを低い数値から試してみて、深さ1～7の7段階より適切なものを使用してください。


使用方法

あらかじめ、ご使用の血糖自己測定器を準備しておきます。

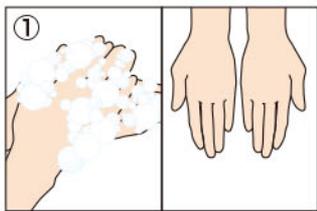


① 測定の前には必ず流水でよく手を洗い、乾かしてから測定を行ってください。


※アルコール綿による消毒のみでは糖分の除去が不十分との報告があります。

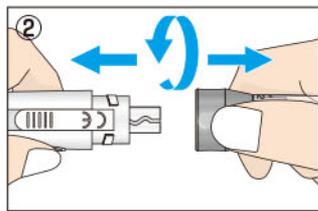


② 穿刺キャップを回して外します。

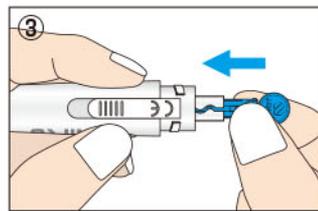


③ ランセット(穿刺針)を装着します。

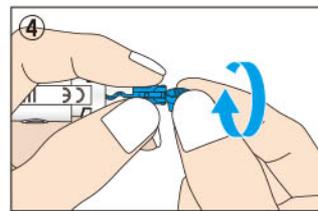


④ 保護キャップをねじって取り外します。

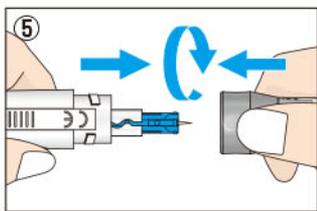


⑤ 穿刺キャップを回し、カチッとするまでしっかりセットします。

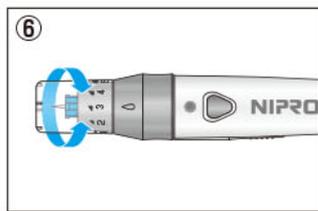

⑥ 調節ダイヤルで穿刺の深さを調節します。

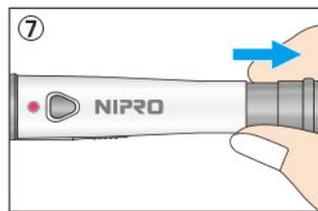


⑦ カチッというまでコックハンドルを引き上げます。(確認窓が●→●になります)

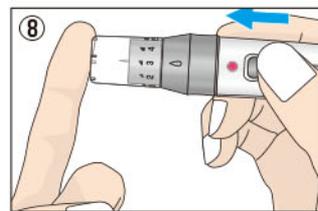


⑧ ニプロライトショットLを押しあて、穿刺ボタンを押します。

- 指以外の部位では、穿刺後すぐにニプロライトショットLを離さず、測定に適した血液量が得られるまで穿刺部位を徐々に強く押すようにしてください。
- 採血量が足りない場合は新しいニプロランセットで再度②～⑧の操作を行ってください。

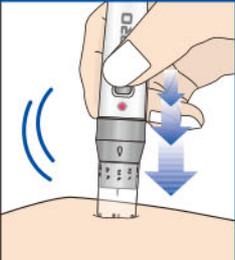


<注意>


- 穿刺は、穿刺部位をよくマッサージしてから穿刺してください。
- 採血の際は穿刺部位や穿刺器具本体を動かさないようにしてください。
- 末梢血流が減少した患者の指先から採血した場合は、血糖値が偽低値を示すことがあります。
- 耳朶等の組織が薄い部位への穿刺を行う場合には、穿刺部位の裏側を直接指で支えないでください。

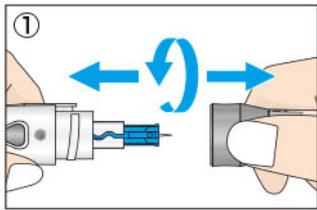

① 穿刺キャップを回して外します。

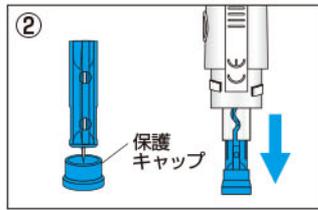

② 使用後のランセットは保護キャップをかぶせてから取り外し、医療機関等の指示に従って処理してください。

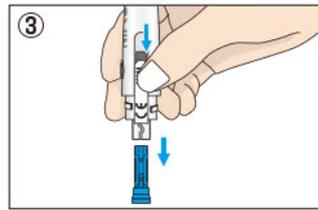

③ 穿刺器具本体の上部にある排出レバーを下にスライドさせ、使用後のニプロランセットを取り外します。

※使用後のランセットは医療機関等の指示に従って処理してください。

●ランセット(穿刺針)を装着したニプロライトショットLは、他人に向けて使用しないでください。

製品に関する
お問い合わせ先

ニプロ株式会社 ☎ 0120-834-226

9:00~17:30(土・日・祝祭日をのぞく)
電話番号をよくお確かめの上、おかけ頂きますようお願い致します。

当フリーダイヤルでは、お客様に適切な対応をさせていただく為に個人情報をお伺いしております。必要な情報をいただけない場合には適切な対応等ができない場合があります。



製造販売

ニプロ株式会社
大阪市北区本庄西3丁目9番3号

医療機器届出番号 27B1X00045000114