


ニプロライトショットL

使用方法

本製品は個人の使用に限り、複数の患者様に使用しないでください。

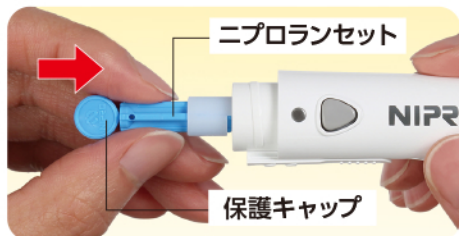


ニプロライトショット®L (本体) の穿刺キャップを外し、ニプロランセット (針) を装着してから針の保護キャップを外します。調節ダイヤルで穿刺の深さを調節します。



カチッというまでコックハンドルを引きあげます。(確認窓が●→●になります)



本体を肌に軽く当て穿刺ボタンを押してください。すぐに離さずしばらく押し当て、直径1ミリほどの血液が確認できたところで離してください。

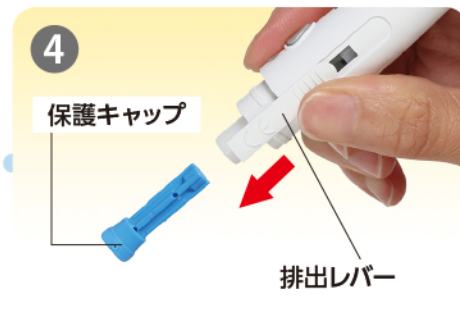

本体の穿刺キャップを外し、針に保護キャップをします。側面にある排出レバーを下にスライドさせ、使用後のランセットを取り外します。

製品に関するお問い合わせ先

やさしいニプロ
0120-834-226

24時間365日 電話を受け付けております。
平日17:30～翌日9:00/土・日・祝は、サービス内容が限られます。

電話番号をよくお確かめの上、おかけ頂きますようお願い致します。

当フリーダイヤルでは、お客様に適切な対応をさせていただく為に個人情報をお伺いしております。必要な情報をいただけない場合には適切な対応ができない場合があります。

NIPRO 製造販売

ニプロ株式会社
大阪市北区本庄西3丁目9番3号
[ライトショット®]はニプロ株式会社の登録商標です。

注意

採血の際は穿刺部位や穿刺器具を動かさないようにしてください。