

ニプロセーフタッチランセット専用穿刺器具

ニプロセーフタッチ® ライトショット

採血用穿刺器具 医療機器届出番号 27B1X00045000123 一般医療機器(クラスI)




使用方法



ダイヤルを回し、希望する穿刺深さに設定してください。初めてお使いになるときは深さ1から試してください。1(浅い)~5(深い)の5段階より適切な深さを使用してください。

深さゲージ	1	2	3	4	5
穿刺深さ(mm)	0.3	0.7	1.1	1.5	1.9

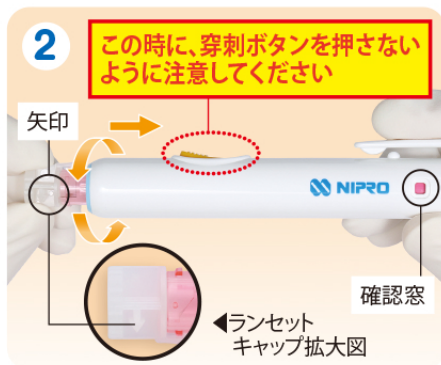

ランセットを装着部にまっすぐ挿入し、取り付けます。このとき、確認窓がピンク色になるまでしっかりと押し込みます。ランセットのキャップをはずします。キャップの矢印方向へ1回転させ取り外します。**キャップは穿刺器具に取り付けた後にはずしてください。**



ランセットを穿刺する部位に当て、穿刺ボタンを押すと穿刺されます。



穿刺器具上部にある廃棄ボタンを押して、使用後のランセットを取りはずします。

製品に関するお問い合わせ先

やさしいニプロ
☎ 0120-834-226 電話番号をよくお確かめの上、おかけ頂きますようお願い致します。

24時間365日 電話を受け付けております。

平日17:30~翌日9:00/土・日・祝は、サービス内容が限られます。

当フリーダイヤルでは、お客様に適切な対応をさせていただく為に個人情報をお伺いしております。必要な情報をいただけない場合には適切な対応等ができない場合があります。

NIPRO 製造販売 ニプロ株式会社
大阪市北区本庄西3丁目9番3号
セーフタッチ®はニプロ株式会社の登録商標です。

センサー、針については医療機関に相談して処理してください。