

単回使用自動ランセット

セーフティリズ

ニプロLSランセット


医療機器 認証番号:224AABZX00195000 管理医療機器(クラスII) ガンマ線滅菌済



使用方法 <指先の穿刺の場合>

※血流を良くするため穿刺部を暖かみを感じる程度にこすってから使用してください。

センサー、針については医療機関に相談して処理してください。

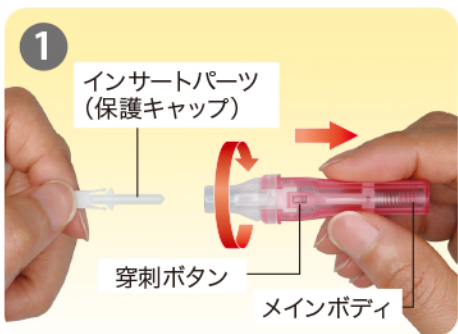

ニプロLSランセットのインサートパーツ(保護キャップ)を持って、メインボディを2,3回まわして取り外します。

※穿刺針はメインボディ内に格納されています。



アルコール綿で穿刺部を清潔にし、十分乾かしてください。ニプロLSランセットを人差し指と中指ではさんで親指を穿刺ボタンの上にあてる形で持ち、穿刺部(指先、手のひら等)に押しあてます。



穿刺ボタンを押すと作動し、穿刺針が出ます。



本体先端を穿刺部周囲に軽く押し、血液を採取してください。



穿刺終了後、使用後のニプロLSランセットを廃棄します。

注意 採血の際は穿刺部位や穿刺器具を動かさないようにしてください。

実物大



<血液サンプルイメージ>

製品に関するお問い合わせ先

やさしいニプロ

0120-834-226

電話番号をよくお確かめの上、おかけ頂きますようお願い致します。

24時間365日 電話を受け付けております。
平日17:30~翌日9:00/土・日・祝は、サービス内容が限られます。

当フリーダイヤルでは、お客様に適切な対応をさせていただく為に個人情報をお伺いしております。必要な情報をいただけない場合には適切な対応等ができない場合があります。