

【注意】 詳しくは添付文書および取扱説明書(製品添付文書)をお読みください。

### 使用方法

#### クイックモード・通常モード

## はじめに 血糖測定をする前に手を洗いましょう。

※アルコール綿による消毒のみでは糖分の除去が不十分との報告があります。



測定の前には必ず流水でよく手を洗い、乾かしてください。



#### クイックモード

## STEP 1 血糖測定の準備をしましょう。



電極部を上に向け、CFセンサーの中央部を持ってメーターに挿入します。



CFセンサーを認識し、自動的に電源が入り、採血画面が表示されます。

※CFセンサーは正しくメーターに挿入してください。

#### 通常モード

## STEP 1 血糖測定の準備をしましょう。



◎ボタンを3秒間押し、メニュー画面を呼び出します。◎ボタンを1回押し、「測定」を選択し、◎ボタンで決定します。



画面上に上記画面が表示されます。



◎ボタンを1回押します。画面上に上記画面が表示されます。



電極部を上に向け、CFセンサーの中央部を持ってメーターに挿入します。



CFセンサーを認識し、採血画面が表示されます。

取扱上の注意 CFセンサーは1回限りの使用です。再使用はできません。  
※CFセンサーは正しくメーターに挿入してください。


#### 血糖測定に必要なもの



(血糖自己測定器) ニプロケアファスト<sup>®</sup>R



(専用電極) ニプロCFセンサー

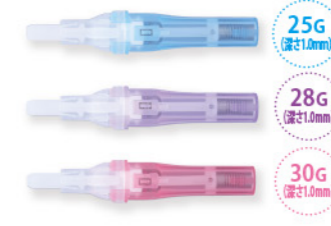


(単回使用自動ランセット) ニプロLSランセット




(アルコール綿) ニプロクリン<sup>®</sup>

#### クイックモード・通常モード

## STEP 2 採血をしましょう。(いずれかを選択し、採血しましょう。)

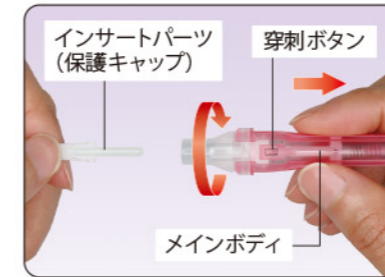

ニプロLSランセットのインサートパーツ(保護キャップ)を持って、メインボディを2,3回まわして取り外します。

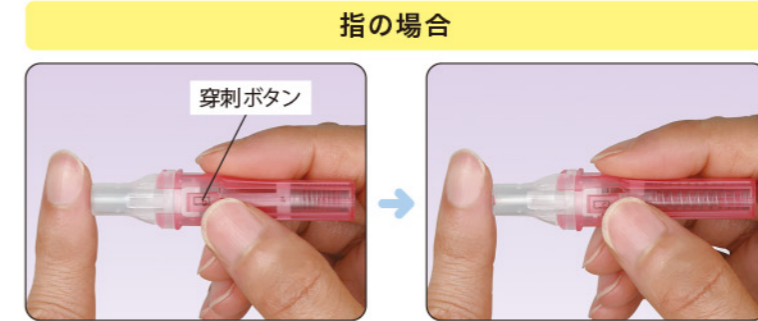

#### 指の場合

アルコール綿で穿刺部を清潔にし、十分乾かしてください。ニプロLSランセットを人差し指と中指ではさんで親指を穿刺ボタンの上にあてる形で持ち、穿刺部(指先、手のひら等)に押しあてます。



#### 手のひらの場合

穿刺ボタンを押すと作動し、穿刺針が出ます。作動するまでニプロLSランセットを穿刺部から離さないでください。

ご使用のポイント 低血糖の兆候、症状があらわれた場合は、指先から採血することをおすすめします。

※穿刺針はメインボディ内に格納されています。  
※血流を良くするため穿刺部を暖かみを感じる程度にこすってから使用してください。



クイックモード・通常モード

## STEP 3 血液をセンサーに吸入させましょう。

指の場合



手のひらの場合



CFセンサーの血液吸入部に血液を吸入させます。採血画面が表示されている間に、血液をCFセンサーの先端から吸入させてください。

※血液を吸入するときは、指先、手のひらを下側にして、血液をCFセンサーに吸入させてください。

クイックモード・通常モード

## STEP 4 測定結果を表示します。



カウントダウン(5~1)後、測定結果が表示されます。

※測定値20mg/dL未満の場合は「Low」、600mg/dLを超える場合は「High」を表示します。

目標設定が設定されていますので、測定値の高値、低値により数字の色が変わります。

H	高い(赤)	600mg/dL以上
	やや高い(オレンジ)	599mg/dL
	目標範囲(緑)	22~598mg/dL
	やや低い(水色)	21mg/dL
L	低い(青)	20mg/dL以下

## STEP 5 片付けましょう。



メーター側面の排出レバーを下にスライドさせ、CFセンサーを排出します。



穿刺終了後、使用後のニプロLSランセットを廃棄します。

### 取扱上の注意

CFセンサー、針については医療機関に相談して処理してください。

### ご使用上の注意

- CFセンサー、ニプロLSランセットは1回限りの使用です。再使用はできません。
- ニプロケアファスト®Rは必要血液量が少ないので、手のひらなどからの採血で血糖測定ができますが、**低血糖の兆候や症状があらわれた場合は、指先から採血**することをお勧めいたします。
- 耳朶等の組織が薄い穿刺部位の場合には、貫通の恐れがあるので穿刺部位の裏側を直接指で支えないでください。

### 製品に関するお問い合わせ先

ニプロケアファスト®に関する疑問・質問などございましたら、お気軽に右記「お客様相談窓口(通話料無料)」にお問い合わせください。治療などに関しましては主治医にご相談ください。

やさしいニプロ  
☎ **0120-834-226**

電話番号をよくお確かめの上、おかけ頂きますようお願い致します。

**24時間365日 電話を受け付けております。**

平日17:30~翌日9:00/土・日・祝は、サービス内容が限られます。

当フリーダイヤルでは、お客様に適切な対応をさせていただく為に個人情報をお伺いしております。必要な情報をいただけない場合には適切な対応等ができない場合があります。

本品は充電式の血糖自己測定器です。開封時には、日時設定が初期化されている場合がありますので、

**初めてのご使用前には、必ず充電を行い、日時設定を確認した後、測定を実施してください。**




パソコン(起動状態)からの充電の場合

コンセントからの充電の場合(専用ACアダプタ)

※専用ACアダプタ以外で充電しないでください。

### 採血可能箇所

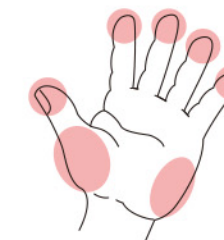

※採血部位によって血糖値が異なる場合があります。主治医にご相談ください。

### 血液サンプルサイズ

● 3μL ● 1μL ● 0.4μL  
ニプロケアファスト®R

※血液サンプルサイズはイメージであり、実際の血液量ではありません。