

ハートラインアプリのアップデート（手動更新）について

アプリを更新することで、最新機能を利用できるようになるほか、より快適にご利用になれます。

1 下記QRコードを読み取ります。



iOSの方



Androidの方




読み取りが難しい場合は、
アプリストアから「ハートライン」
を検索してください。

2 画面の表示にしたがい
「アップデート」を行います。



「アップデート」をタップします。

3 「開く」と表示されたら
アップデート完了です。

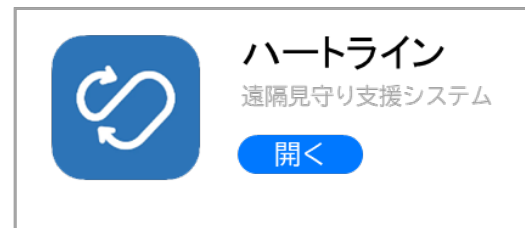

アプリのアップデートを自動更新設定にされている場合は本操作は必要ありません。
お使いの端末やOSバージョンによって、本掲載内容が実際のものとは異なる場合がございます。ご了承ください。