






Vトラスト[®] SARS-CoV-2 Ag (一般用) クイックガイド

キット内容

- スワブ(綿棒) 
- テストカートリッジ 
- 抽出液チューブ 
- ノズルキャップ 
- 廃棄用袋 


- ご使用前に添付文書をよく読んでお使いください。
- 検査結果から自分で病気の診断をすることはできません。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 直射日光や高温多湿を避け、2～30℃で保管してください。

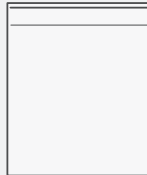使用方法の動画は、こちらから

Vトラスト[®] web サイト
https://med.nipro.co.jp/ratvt_nprgeneral




準備

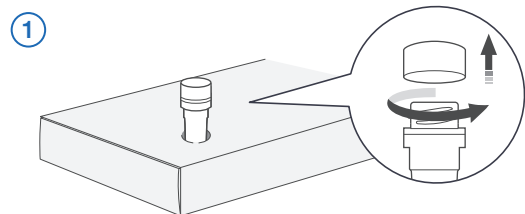


外箱の切り取り線部に抽出液チューブを差し込みます。
 また抽出液チューブのキャップを慎重に外しておきます。

検体の採取

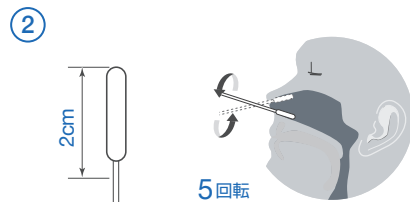

鼻腔に2cm程スワブを挿入し、鼻腔の粘膜に沿って
 5回転させ、5秒静置し、引き抜いてください。

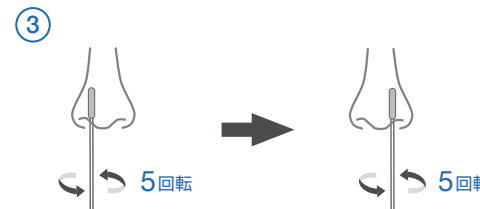


もう一方の鼻腔にも同じスワブを使い、同様に
 5回転させ、5秒静置し、引き抜いてください。


検体の処理




スワブに収集した検体を抽出液
 チューブに浸します。
 底面と側面に先端を押し付けなが
 ら、スワブを10～20回転させます。

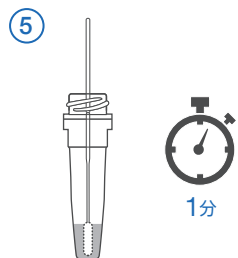


スワブを抽出液チューブに
 1分間浸しておきます。

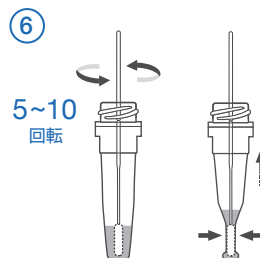

スワブをチューブ内で5～10回
 回転させた後、チューブ側面を絞
 るようにして、スワブを抜き取り
 ます。

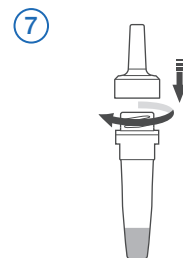

ノズルキャップを抽出液チューブ
 に取り付けます。

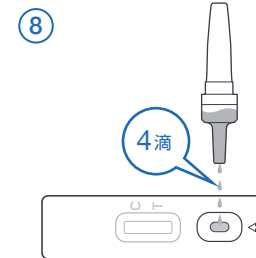


抽出液チューブの中の溶液を
 サンプル滴下部に、4滴落とし
 ます。

結果の判定方法は裏面へ▶

結果の確認

⑨

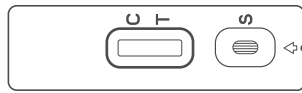

15分

滴下後15分で結果が判定できます。
陽性の場合はより早い段階で確認できることがあります。


※20分以上経過後は誤った結果を示す可能性があるため
15分で判定してください。

⊕ 陽性



テストライン(T)とコントロールライン(C)の両方が認められた場合、陽性と判定します。
テストライン(T)の色が薄くても、陽性と判定します。

⊖ 陰性

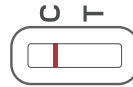

コントロールライン(C)のみが認められた場合、陰性と判定します。

⊗ 無効



コントロールライン(C)が認められなかった場合は、テストライン(T)の有無にかかわらず無効です。
再検査を行ってください。

結果判定や操作方法、基本的事項については、こちらから確認できます。



Vトラスト® web サイト

https://med.nipro.co.jp/ratvt_nprgeneral

使用上の注意

- この検査薬は、薬剤師から説明を受け、「使用上の注意」をよく読んでお使いください。
- 検査結果が「陽性」の場合は、適切に医療機関の受診等を行ってください。
- 検査結果が「陰性」であっても、症状がある場合には、適切に医療機関の受診等を行ってください。



製造販売

ニプロ株式会社
大阪府摂津市千里丘新町3番26号

お問い合わせ

ニプロ抗原検査キットお問い合わせ窓口

受付時間 9:00~18:00 (祝日を除く月~金)



0120-253-425