

「NOHCS口腔ケアキット1回用」仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「NOHCS口腔ケアキット1回用」につきまして、仕様変更を行うこととなりましたので、ご案内申し上げます。

今後とも弊社商品をご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

敬具


対象品番

商品コード	商品名	JANコード	変更ロット	変更時期
21-804	NOHCS口腔ケアキット1回用(吸引ブラシ)	4987458218040	21D15	2021年7月
21-805	NOHCS口腔ケアキット1回用(吸引スポンジ)	4987458218057	21D16	2021年8月

変更内容

- ・吸引ブラシ及び吸引スポンジについて、スイッチ部の吸気口を大きくします。
- ・変更前は吸引圧の上限を20kPaとして設計しており、それを超える圧力をかけると、スイッチをOFFにしても、先端から吸引されてしまう事象が発生しておりました。
- ・変更により、吸引圧の上限が60kPaになります。

現行

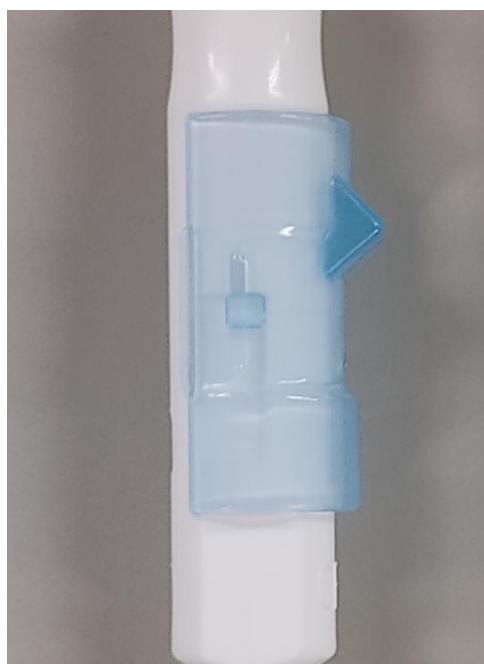

変更後

