

医療機器の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。

透析用血液回路セット「シュアフロー[®]NJ」に関するご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

今般、弊社が製造販売しております透析用血液回路セット「シュアフロー[®]NJ」(以下「本製品」といいます)におきまして、補液ラインのオスコネクタと透析装置のオンラインポートとの接続部から透析液の漏れが生じた事例のご報告を複数の医療機関から受領いたしました。

本製品のご使用にあたっての注意事項は電子化された添付文書に記載しております。引き続きご留意いただきますと共に、下記重要な事項をご確認いただき、ご使用くださいますよう、何卒、宜しく願い申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、何卒、宜しく願いいたします。

謹白

記


【重要な事項】

- ・ 接続後コネクタ等を増し締めし、緩みや脱落がないことを確認してください。
- ・ 本品の使用中は、定期的に接続部の緩み、薬液漏れ等を確認してください。

【接続時注意点】



①テーパ部分を差し込んでください。

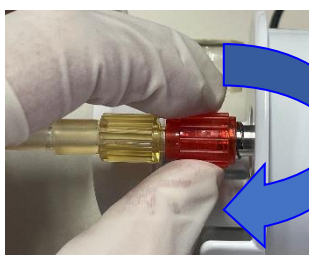

②カプラを回してください。



③しっかり嵌合していることを確認してください。

製造販売 ニプロ株式会社

大阪市北区本庄西3丁目9番3号

お問い合わせ先

透析・血液浄化商品開発・技術営業部

TEL 06-6373-0092 FAX 06-6373-1581