

◆アプリのアップデートについて ver.1.0.4 **iOS端末のみアプリのアップデートが必要です。**

ニプロハートライン™1.0.4には、以下の機能改善が含まれます。
お客様にはお手数をおかけしますが、アップデート後はアプリの再起動をお願い致します。

2022年9月21日

Android端末をご利用のお客様は、アプリのアップデートは必要ありません。(ver.1.0.3のまま)
アプリの再起動のみ実施してください。

【医療者ID】をご利用の方

- ① クレジットカード決済を追加
- ② 支払グループを作成することで医療者・患者さん分の利用料をまとめて支払うことが可能
- ③ 「設定」機能の追加
- ④ 消灯機能を追加

⑤ 【iOS端末でアプリ使用の方のみ】

応答可を設定時、患者さんのしきい値アラートを受ける機能を以下の状態時に追加

- ▶ ログイン中、バックグラウンドにアプリがあるとき
- ▶ ログアウト中、バックグラウンドにアプリがあるとき
- ▶ ログアウト中、アプリを閉じたとき

約7秒鳴った後、止まります。プッシュ通知をタップすることでも音は止まります。

【患者ID】をご利用の方

- ① クレジットカード決済を追加
- ② プロフィール設定の機能追加

【マニュアル更新について】

本件に伴い、マニュアルを更新しました。
詳しくは、操作説明書ver1.4「準備編」をご覧ください。

＜本件に関するお問い合わせ＞

ニプロ株式会社
地域医療連携チーム

URL <https://www.nipro.co.jp/contact/heartline/>

