

「ニプロフリースタイルフリーダム ライト」 時計設定の方法について

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社血糖測定器「ニプロフリースタイルフリーダム ライト」において、本体日時設定時のボタン操作で 2022 年に移行しないという事象が確認されました。

つきましては、下記のような手順で操作いただけましたら問題無くご使用いただけますので、お客様にはお手数ではございますが何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

記

現 象

ニプロフリースタイルフリーダム ライトの年設定を 2022 年へ手動で変更しようとした場合、セット画面で年の設定の時に、C ボタンを押していくと 2007・・・2021 となり、もう一度 C ボタンを押すと、2022 年にらずに 2007 年に戻り、2022 以降の年の設定ができなくなる。

*：日時設定操作をしていないメーターは、2021-12-31 23:59 から 2022-01-01 00:00 に自動的に年の更新はされています。

対 象 機 器



ニプロフリースタイルフリーダム ライト

自己検査用グルコース測定器

医療機器承認番号: 22200BZX00881A01

高度管理医療機器(クラスⅢ) 特定保守管理医療機器

対象シリアル No.

CEGR0000-000000、CEGS0000-000000

CEGT0000-000000、CEGU0000-000000

CEGV272-000000、CEGV273-000000

CEGV342-000000、CEGV343-000000

時刻合わせ手順

- ①mボタンを2秒以上長押しし、セット画面にてメーターの年月時刻設定を
2021-12-31 23:59
にし、セット完了します。
一旦電源をオフにします。



- ②電源がオフの状態で1分間以上待つて、再度mボタンを2秒以上長押しし、セット画面を立ち上げて、現在の月・日・時刻に合わせます。

**※このとき年は2022となっているので
年の変更はしません。**

もし、年の変更をしてしまうと2007に戻ってしまい、2021年までしか設定できなくなります。

その時には再度①からやり直します。



お問い合わせ

この度、弊社血糖測定器につきましてご迷惑をお掛け致しまして誠に申し訳ございません。
もしご不明な点がございましたら、フリーダイヤルもしくは、弊社営業担当までお問い合わせください。
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

以上