

「ハイプロックスアクセルワイプ」 製品ラベル表示変更のお知らせ

拝啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、このたび標題製品のラベル表示を一部変更させて頂くことになりましたので、ご案内申し上げます。
何卒ご理解の上、ご確認を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

変更点

製品開封有無にかかわらず、製品を横倒しにすることで液漏れの可能性があります。
そのため、製品ラベルに「**横倒し厳禁**」のマークを追記します。
また、ラベルの注意事項にも「**立てて保管**」と追記します。

変更前

<p>注意事項 注意：DECD(経済協力開発機構)の定めた基準により、本製品は皮膚や目を刺激しないことが認められていますが、他の清掃製品と同様、子供の手の届かない場所に置いて下さい。</p> <p>※以下の物への継続的使用は要注意。一部損傷、腐食の恐れがありますので、使用前にテストをお奨めします。表面保護のため使用後は表面を滅菌水と滅菌ガーゼで清拭し、成分が残留しないように注意して下さい。</p> <p>ポリアセタール樹脂、ネオプレン、冷延鋼、真鍮、青銅、銅、炭素鋼、メッキ</p> <p>※医療機器に使用する場合は使用前に必ず機器の取扱説明書で素材や個別の注意事項を確認し、原則として外側のみにご使用下さい。</p> <p>安全対策 目に入らないようにしてください。他の洗浄剤や除菌剤と混ぜないで下さい。塩素系の製品と一緒に使用しないで下さい。</p> <p>応急処置 万一、目や皮膚に触れてしまったら、すぐに水で洗い流して下さい。刺激が続く場合は医師にご相談ください。飲み込んでしまった場合は、吐こうとはせず、直ちに医師または保健所にご相談下さい。診察を受ける際は、カナダPDP(ベストコントロールプロダクト)登録番号を控えて、容器のラベルか、製品名を書き留めて持参して下さい。</p> <p>保管 凍結しないようにして下さい。高温の場所での保管は避けて下さい。化学物質、直射日光、高温や炎を避け、乾燥して凍結する場所をしっかりと締め、立てた状態で保管して下さい。</p> <p>廃棄 ワイブは水に溶けないので、水洗トイレには流さないで下さい。容器を処分する際は、地域の規則に従って下さい。</p> <p>使用上の注意 本製品を使用の際は、必ずラベルの指示に従って下さい。</p> <p>製品をご使用になる前に SDS(安全データシート)をお読み下さい。</p> <p>製造元 バイロックステクノロジ社、カナダ・オンタリオ州</p> <p>加速化過酸化水素及びデザインは、ライセンス済みのバイロックス社の商標です。 本製品の開発は、カナダジェネラルスタンダードの基準に従って行われています。CAN/CGSB-2.181-07</p>
--

変更後

<p>注意事項 注意：DECD(経済協力開発機構)の定めた基準により、本製品は皮膚や目を刺激しないことが認められていますが、他の清掃製品と同様、<u>子どもの手の届かないところに立てて保管</u>して下さい。</p> <p>※以下の物への継続的使用は要注意。一部損傷、腐食の恐れがありますので、使用前にテストをお奨めします。表面保護のため使用後は表面を滅菌水と滅菌ガーゼで清拭し、成分が残留しないように注意して下さい。</p> <p>ポリアセタール樹脂、ネオプレン、冷延鋼、真鍮、青銅、銅、炭素鋼、メッキ</p> <p>※医療機器に使用する場合は使用前に必ず機器の取扱説明書で素材や個別の注意事項を確認し、原則として外側のみにご使用下さい。</p> <p>安全対策 目に入らないようにしてください。他の洗浄剤や除菌剤と混ぜないで下さい。塩素系の製品と一緒に使用しないで下さい。</p> <p>応急処置 万一、目や皮膚に触れてしまったら、すぐに水で洗い流して下さい。刺激が続く場合は医師にご相談ください。飲み込んでしまった場合は、吐こうとはせず、直ちに医師または保健所にご相談下さい。診察を受ける際は、カナダPDP(ベストコントロールプロダクト)登録番号を控えて、容器のラベルか、製品名を書き留めて持参して下さい。</p> <p>保管 凍結しないようにして下さい。高温の場所での保管は避けて下さい。化学物質、直射日光、高温や炎を避け、乾燥して凍結する場所をしっかりと締め、<u>立てた状態で保管</u>して下さい。</p> <p>廃棄 ワイブは水に溶けないので、水洗トイレには流さないで下さい。容器を処分する際は、地域の規則に従って下さい。</p> <p>使用上の注意 本製品を使用の際は、必ずラベルの指示に従って下さい。</p> <p>製品をご使用になる前に SDS(安全データシート)をお読み下さい。</p> <p>製造元 バイロックステクノロジ社、カナダ・オンタリオ州</p> <p>加速化過酸化水素及びデザインは、ライセンス済みのバイロックス社の商標です。 本製品の開発は、カナダジェネラルスタンダードの基準に従って行われています。CAN/CGSB-2.181-07</p>
--



対象製品・変更ロット

製品名	包装	商品コード	JAN コード	変更ロット	出荷予定時期
ハイプロックスアクセルワイブ	12個/箱	10-027	4987458100277	L110322VX02	6月上旬*

*出荷予定時期は在庫数により前後することがございます。