

医療機器の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。

## 中心静脈用カテーテルイントロデューサキット 「ニプロセーフレットカテーテルキットPU(セルジンガータイプ)」に関する 使用上の注意のお願い

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

今般、弊社が製造販売しております中心静脈用カテーテルイントロデューサキット「ニプロセーフレットカテーテルキットPU(セルジンガータイプ)」(以下「本製品」といいます。)におきまして、医療機関様から本製品のガイドワイヤが少しの力でキンク(折れ曲がり)する事例のご報告を受領いたしました。

つきましては、大変お手数ではございますが、下記の重要な事項を必ずご確認くださいからご使用くださいますよう何卒お願い申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう何卒お願い申し上げます。


謹白

### 記


#### ◆ 重要な事項(血管損傷等の重大な有害事象の発生を防ぐため、下記の事項を必ずご確認ください。)

- ・カテーテル、ガイドワイヤを操作・留置する際には、X線透視下で確認しながら行ってください。
- ・血管内へガイドワイヤを進める際に抵抗を感じたら、無理をせずに抜去してください。

#### ◆ 図

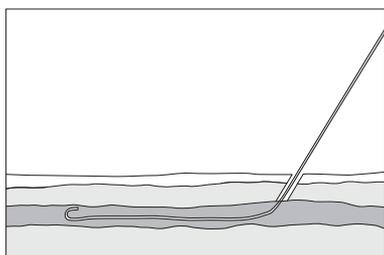

正しく挿入できている場合

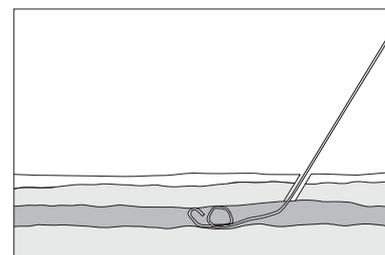

キンク(折れ曲がり)している場合

製造販売：ニプロ株式会社

大阪市北区本庄西3丁目9番3号

お問い合わせ先：第一商品開発営業部

電話 06-6373-0563 FAX 06-6373-0564

2016-005