

新発売

平成30年6月



クッションマテリアル

フォームクーヘン™



特 長

- 2.5mm厚、5.0mm厚のラインナップがあり、シーンに合わせて使い分けることができます。
- 一般的なフィルムドレッシング材よりも低粘着設計のため、剥離時の皮膚刺激が少ないです。
- 自重負荷の分散目的としても使用できます。
- ウレタンフォームと厚さ6μmのポリウレタンフィルムを貼り合わせた構造のため、製品の断裂が起こりにくく、水蒸気透過性に優れています。

規 格


医療機器クラス分類：なし(雑貨)

JANコード*	商品コード*	品番・規格	サイズ(厚さ×幅×長さ)	参考価格	梱包
4987458211737	21-173	フォームクーヘン 1号	5mm×10cm×2m	3,500 円/箱	20箱(1巻/箱×20箱)
4987458211744	21-174	フォームクーヘン 2号	2.5mm×10cm×2m	3,300 円/箱	20箱(1巻/箱×20箱)

発売時期

平成30年6月

使用方法

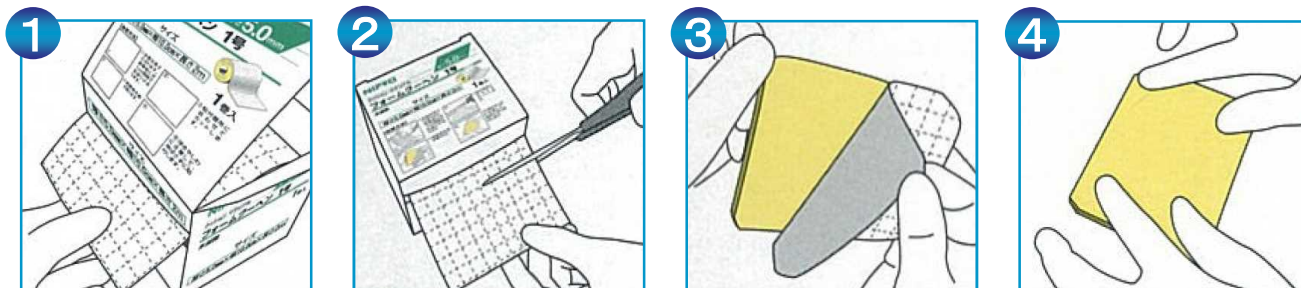

1 開封口のミシン目を切り取り、中身をセットします

2 ミシン目から中身を取り出し、長さを決めてカットします。

3 裏面の剥離紙を剥がします。

4 浮きやしわに注意して、伸ばさずに貼付します。

使用シーン

医療関連機器圧迫創傷(MDRPU)の原因となる医療機器の例

■ NPPVマスク

■ 酸素カニューラ

■ 医療用弾性ストッキング


■ 気管チューブ

■ ギプス・シーネ等の固定具

■ 輸液コネクタ

※ その他、褥瘡の発生対策として、大転子部、仙骨部、踵骨部等負荷のかかる様々なシーンにもご使用いただけます。

貼付イメージ

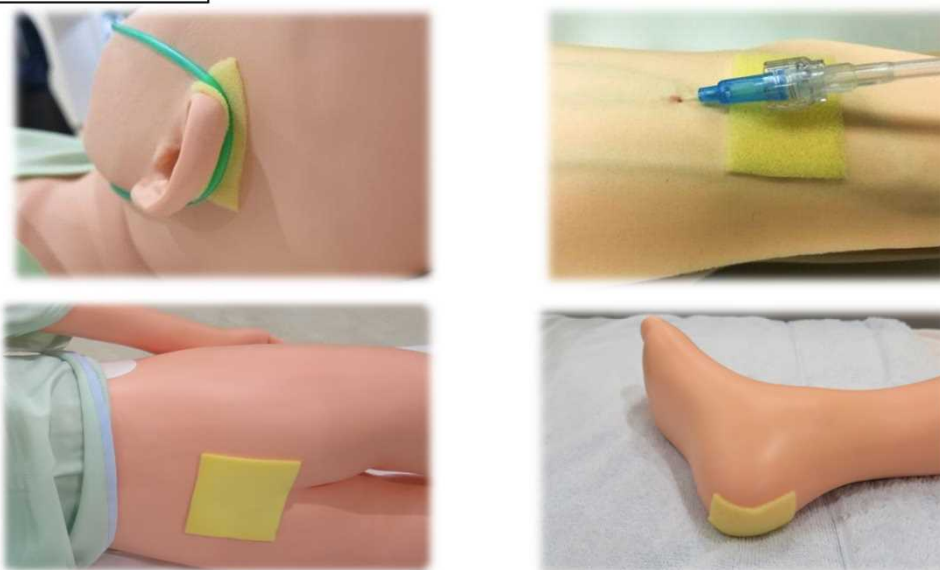

※本品は未滅菌品のため、直接創部への貼付はお控えください。