

SARSコロナウイルス抗原キット / インフルエンザウイルスキット

Vトラスト® SARS-CoV-2 + Flu Ag クイックガイド

- ご使用前に電子添文をよく読んでお使いください。
- 検査結果から自分で病気の診断をすることはできません。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 直射日光や高温多湿を避け、2～35℃で保管してください。

使用方法の動画は、こちらから

Vトラスト webサイト

https://med.nipro.co.jp/ratvtflu_npr



キット内容

スワブ(綿棒)


テストカートリッジ

抽出液チューブ

ノズルキャップ


ディスポーザブルバッグ

※1テスト入のみ

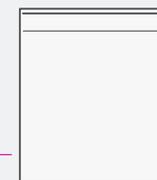

準備

①

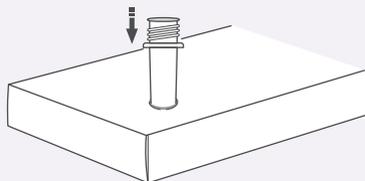

外箱の切り取り線部に抽出液チューブを差し込みます。

検体の採取

②



鼻腔に2cm程スワブを挿入し、鼻腔の粘膜に沿って5回転させ、5秒静置し、引き抜いてください。

③



もう一方の鼻腔にも同じスワブを使い、同様に5回転させ、5秒静置し、引き抜いてください。

検体の処理

④




抽出液チューブのシールをはがし、検体を採取したスワブの頭部を抽出液に浸漬します。スワブを10回転させて検体を懸濁します。

⑤




スワブの先端を搾り取るように、スワブを引き抜きます。

⑥

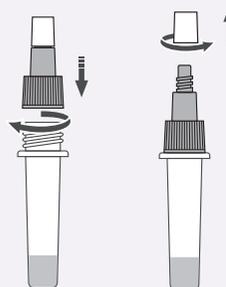

抽出液チューブに紫色のキャップを取り付け、白色のカバーを取り外します。

⑦

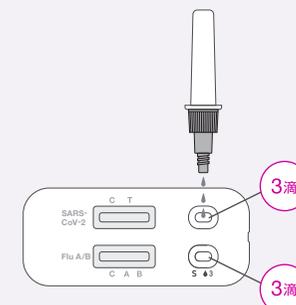

抽出液チューブを搾り、2か所のサンプル滴下部(S)に3滴ずつ滴下します。


結果の判定方法は裏面へ▶

結果の確認

⑧



15分

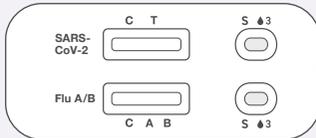


15分後に目視で結果の判定を行います。ただし、15分より前でもコントロールライン(C)が認められ、テストライン(T)またはテストライン(A)、テストライン(B)のいずれかが認められた時点で陽性の判定を行うことができます。

※20分を経過したテストカートリッジの結果判定は行わないでください。

⊕ 陽性


次のようにラインが発色した場合、陽性と判定します。

	表示ライン	判定
①	C, T	新型コロナウイルス陽性
②	C, A	A型インフルエンザウイルス陽性
③	C, B	B型インフルエンザウイルス陽性

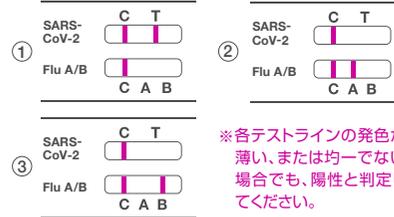


⊖ 陰性

コントロールライン(C)のみが発色した場合、陰性と判定します。

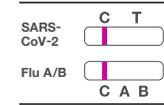

⊗ 無効

コントロールライン(C)が発色しない場合は、テストライン(T, A, B)の発色有無にかかわらず無効です。再検査を行ってください。

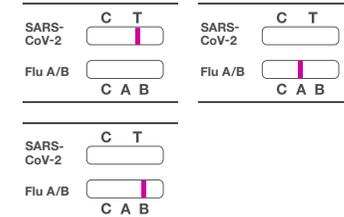

結果に関する注意

- ・本品の判定が陰性であっても、SARS-CoV-2およびインフルエンザ感染を否定するものではありません。
- ・診断は、厚生労働省より発表されている医療機関・検査機関向けの最新情報を参照し、本品による検査結果のみで行わず、臨床症状を含めて総合的に判断してください。

Web サイト

結果判定や操作方法、基本的事項についてはこちらから確認できます。

Vトラスト webサイト
https://med.nipro.co.jp/ratvtflu_npr



お問い合わせ

ニプロ株式会社 医療機器情報室

受付時間 9:00~17:15(土・日・祝日・その他弊社休業日を除く)



0120-226-410



製造販売 ニプロ株式会社
 大阪府摂津市千里丘新町3番26号